



tellimed[®]

AUF NUMMER SICHER



Bedienungsanleitung

Notrufarmband
tellimed Carino

Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit der Entscheidung für das Notrufarmband tellimed Carino haben Sie eine gute Wahl getroffen. Einfache Bedienung, schönes Design, kompakte Abmessungen und eine zuverlässige Funktion zeichnen dieses Notrufsystem aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um jederzeit auftretende Fragen nachschlagen zu können. Sollten Sie Fragen haben, die nicht durch diese Bedienungsanleitung beantwortet werden, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.tellimed.de.

Haben Sie Anregungen? Der tellimed Kundenservice ist gerne für Sie da. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Diese Bedienungsanleitung ist mit größter Sorgfalt erstellt worden. tellimed behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung anzupassen. tellimed haftet nicht für eventuelle Versehen oder Irrtümer.


Inhaltsverzeichnis

1.	tellimed Carino	4 - 5
1.1.	Übersicht	4
1.2.	Notruf auslösen	5
1.3.	Notruf unterbrechen	5
1.4.	Aufladen	5
2.	Inbetriebnahme	6
2.1.	Einschalten	6
2.2.	Ausschalten	6
3.	Funktionen	6 - 7
3.1.	Batteriewarnung	6
3.2.	Eingehende Anrufe annehmen	6
3.3.	GPS Ortung	7
3.4.	Hinweis-LED	7
4.	Wichtige Hinweise	10 - 11
4.1.	Mobilfunknetz	7
4.2.	Einsatzzweck	7
4.3.	Verbotene Bereiche für Mobiltelefone	7
4.4.	Implantierte medizinische Geräte	7-8
4.5.	Andere medizinische Geräte	8
4.6.	Kleinkinder	8
4.7.	Reinigen	8
5.	Entsorgung	8 - 9
6.	EU-Konformität	9
7.	Registrierung nach ElektroG	9
8.	Registrierung nach VerpackG	10
9.	Technische Daten	10
10.	Lieferumfang	10

1. tellimed Carino

Mit der SOS-Taste können Sie einen Notruf auslösen. Unterhalb der SOS-Taste befindet sich eine Servicetaste. Über die Servicetaste können Sie eingehende Anrufe annehmen und beenden. Durch einen langen Druck auf die Servicetaste können Sie eine zuvor eingespeicherte Rufnummer anrufen. Der Lautsprecher befindet sich oberhalb der SOS-Taste. Das Mikrofon befindet sich unterhalb der Servicetaste.

1.1. Übersicht

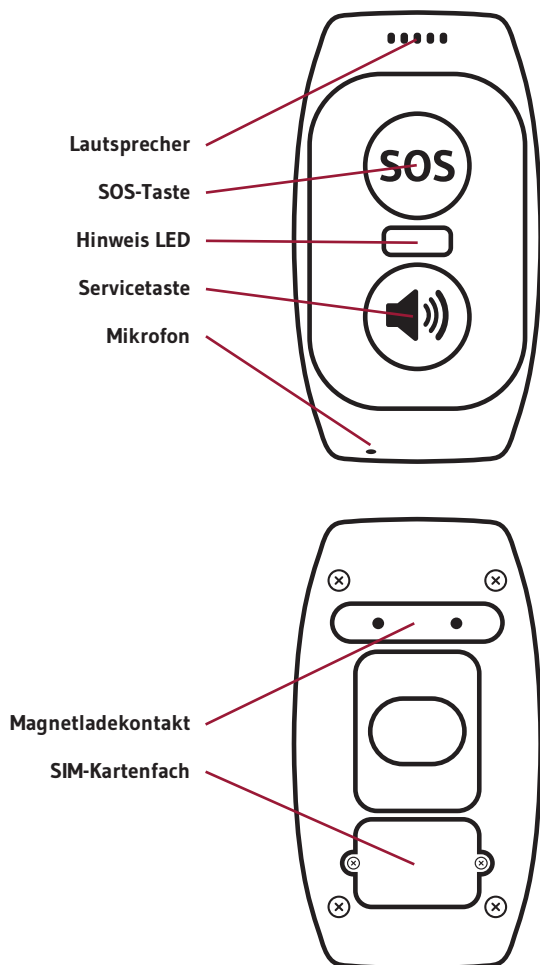

1.2. Notruf auslösen


Halten Sie die SOS-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein akustischer Hinweis „Sie haben die Notruftaste gedrückt, ihr Notrufsystem ruft Hilfe“. Sie können die Taste nun loslassen. Sie werden mit der Notrufzentrale verbunden. Die Rufkette unterbrechen Sie nach erfolgreichem Absetzen eines Notrufes, durch erneutem Drücken der SOS Taste.

1.3. Notruf unterbrechen

Sollten Sie versehentlich einen Notruf ausgelöst haben, können Sie diesen jederzeit durch erneutes Drücken der SOS-Taste beenden.

1.4. Aufladen

Der Akku vom Carino hält bei voller Ladung ca 5 Tage. Wir empfehlen, den Akku nachts am Nachttisch aufzuladen. Dadurch ist der Akku tagsüber immer vollgeladen und Sie haben das Carino nachts immer griffbereit. Wenn Sie die Rückseite vom Carino vor sich sehen, wird das Ladekabel von der rechten Seite aus angelegt (SIM-Fach oben).

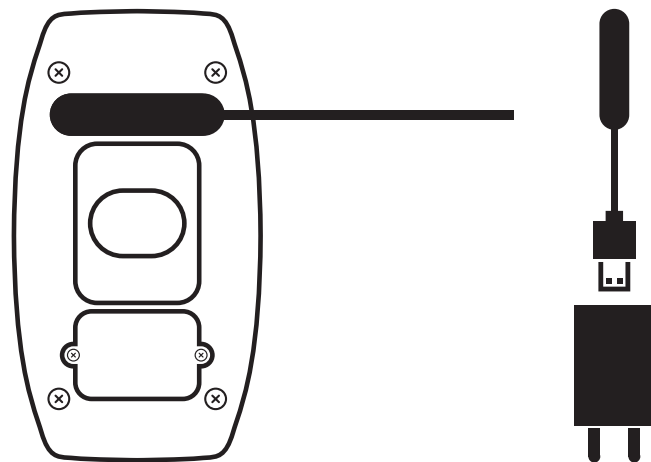

2. Inbetriebnahme

2.1. Einschalten

Halten Sie die SOS-Taste für etwa 3 Sekunden gedrückt. Es ertönt eine kurze Hinweis-Melodie.

2.2. Ausschalten

Sollten Sie das Carino längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, das Carino auszuschalten. Drücken Sie hierfür 1x die SOS-Taste, 2x die Servicetaste und 3x die SOS Taste. Es ertönt eine Hinweismelodie und das Carinoarmband ist ausgeschaltet.

3. Funktionen

Das Carino Notrufarmband ist entwickelt worden um auf möglichst einfache Art und Weise einen Notruf abzusetzen. Der reduzierte Funktionsumfang soll hierbei zu einer größtmöglichen Bediensicherheit führen.

3.1. Batteriewarnung

Sollte die Batterieladung weniger als 15% betragen, erhält die Notrufzentrale einen Hinweis per SMS „battery low“ (SMS-fähige Rufnummern vorausgesetzt). Zusätzlich blinkt die Hinweis LED am Carino etwa alle 2 Sekunden rot.

3.2. Eingehende Anrufe annehmen

Sie können das Carino Notrufarmband als Telefon für eingehende Anrufe verwenden. Bitte beachten Sie hierbei, dass aufgrund der Kompaktheit des Gerätes die Sprachqualität nicht der eines normalen Telefons entspricht. Werden Sie auf dem Carino angerufen, drücken Sie einmal kurz auf die Servicetaste. Das Carino befindet sich dann im Freisprechmodus. Zum Beenden des Anrufes drücken Sie bitte einmal kurz die SOS-Taste. Bitte beachten Sie, dass das Telefonieren mit dem Carino die Aufladung der Batterie deutlich vermindert.

3.3. GPS Ortung

Haben Sie sich für eine Carino mit GPS entschieden, sendet die Carino automatisch Ihre aktuelle Position per Google Maps Link an die Notrufzentrale.

3.4. Hinweis-LED

Blinkt rot = Batterieladung unter 15%

Dauerhaft rot = Carino ist mit dem Ladekabel verbunden und lädt den Akku Dauerhaft

blau = Der Akku ist voll geladen, Ladekabel kann getrennt werden

Dauerhaft rot (ohne Ladekabel) = SIM-Karte hat einen Fehler, ist nicht richtig eingesetzt oder nicht verbunden

4. Wichtige Hinweise

4.1. Mobilfunknetz

Das Carino nutzt Mobilfunktechnologie (2G/4G). In abgelegenen Gebieten sowie Kellern, Garagen etc. kann der Einsatz nicht garantiert werden.

4.2. Einsatzzweck

Das Carino wurde entwickelt um sowohl zuhause als auch unterwegs einen Notruf abzusetzen.

4.3. Verbotene Bereiche für Mobiltelefone

Das Carino darf nicht in Bereichen benutzt werden, in denen der Einsatz von Mobilfunktechnologie verboten ist, wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern, in der Umgebung von medizinischen Geräten oder in der Nähe von Kraftstoffen und Chemikalien sowie Sprenggebieten.

4.4. Implantierte medizinische Geräte

Personen, die ein implantiertes medizinisches Gerät wie z.B.

einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator verwenden, müssen immer einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen dem medizinischen Gerät und dem Carino einhalten. Dieser Abstand wird von Herstellern von medizinischen Geräten empfohlen, um mögliche Störungen zu vermeiden.

4.5. Andere medizinische Geräte

Der Betrieb vom Carino kann unter Umständen den Betrieb von nicht genügend abgeschirmten Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob das Gerät ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

4.6. Kleinkinder

Im Lieferumfang vom Carino befinden sich Teile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

4.7. Reinigen

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchtem Tuch. Vermeiden Sie unbedingt chemische Reinigungsmittel.

5. Entsorgung



Der Akku vom Carino gehört nicht in den Hausmüll. Zur Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung.



Das Carino gehört nicht in den Hausmüll, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden.



Aufgrund der kompakten Bauweise ist eine eigenständige Entnahme der Batterie nicht vorgesehen. Bitte nutzen Sie den tellimed-Service (www.tellimed.de/retoure) für die Entnahme und Entsorgung der Batterie. Damit können Sie sicher sein, dass sie umweltgerecht entsorgt wird. Sie können selbstverständlich auch das komplette Gerät zusammen mit der Batterie über uns recyceln lassen.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

as Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Batterien dürfen nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden. Vollständige Entladung bedeutet das Erreichen der Entladeschlussspannung oder einsetzende Funktionsbeeinträchtigung wegen unzureichender Batteriekapazität. Ein Kurzschluss kann durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen verhindert werden. Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

6. EU-Konformität

tellimed erklärt, dass das Notrufsystem tellimed Carino folgenden Richtlinien entspricht:

2014/53/EU Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt

2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Eine ausführliche Konformitätserklärung erhalten Sie unter www.tellimed.de/download

7. Registrierung nach ElektroG

WEEE-Reg.-Nr. DE 63487850
www.ear-system.de

8. Registrierung nach VerpackG

DE5025250203008
<https://oeffentliche-register.verpackungsregister.org/>

9. Technische Daten

Maße:	55 x 31 x 14,8mm
Gewicht inkl. Akku:	40g
Mobilfunkfrequenz:	850/900/1800/1900 MHz
Frequenzband 900MHz:	max. abgestrahlte Leistung: 1W
Frequenzband 1800MHz:	max. abgestrahlte Leistung: 2W
GSM Antenne:	LDS
Chipset:	Unisoc W307
Batterie, wiederaufladbar:	Lithium Ionen (Polymer), 3,7V, 680 mAh
Akkulaufzeit:	bis zu 5 Tage
Ladezeit:	ca. 2 Stunden
Ladespannung:	3,7 V
SIM-Karte:	Nano SIM
Material Gehäuse:	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonate (PC)
Material Uhrenband:	Silikon
Abmessungen Uhrenband:	13 bis 24,5cm
Breite Uhrenband / Federstege:	18mm
Schutzklasse:	IPX 6
Lagertemperatur:	-20 bis 45 °C
Betriebstemperatur:	-10 bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit:	35 - 80%

10. Lieferumfang

Carino Notrufarmband mit Uhrenarmband (Art-Nr. 2600), 100-240V Steckernetzteil, USB Anschlusskabel, Halskordel, Federstegwerkzeug, Schraubendreher, Bedienungsanleitung



tellimed GmbH & Co. KG
Kastellstraße 31-35, 47546 Kalkar
E-Mail: post@tellimed.de
www.tellimed.de